

# Vario



Vario 8 AC/DC

- ET Kasutusjuhend
- HU Használati útmutató
- CZ Návod k použití
- LT Naudojimosi instrukcijos
- LV Lietošanas instrukcijas
- PL Instrukcja użycia
- SK Návod na použitie
- SL Navodila za uporabo
- DA Brugsanvisning
- EL Οδηγίες χρήσης



5x

077.0571



077.0931




077.0951



077.0082/0085



077.0083/0084

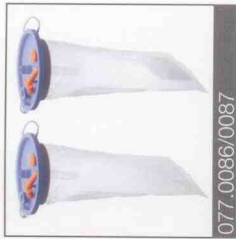

077.0086/0087



077.0110/0120/0155



077.0420



077.0821



077.0823



077.0826



077.0825



077.0831



077.0832



Vario 8



Vario 18



Vario 8 (AC/DC)



Vario 18 (AC/DC)



Vario 8 c/i (AC/DC)



Vario 18 c/i (AC/DC)





## I Toutes nos félicitations

Vous avez acheté un aspirateur à sécrétions de haute qualité. L'agrégat d'aspiration QuatroFlex™ est le successeur novateur du système piston/cylindre éprouvé de Medela. Sa facilité d'utilisation, sa simplicité de nettoyage et les dispositifs de sécurité dont il est équipé sont les avantages supplémentaires de cet aspirateur à sécrétion. Grâce à ses accessoires très variés, le Vario convient parfaitement à de nombreuses applications médicales. Contactez-nous, nous vous conseillerons volontiers!

## II Indications

Le Vario convient particulièrement pour l'aspiration de liquides, sécrétions, tissus chirurgicaux (dont les os) et particules infectieuses. Pour les services d'urgence, le cabinet médical, les soins à domicile. Assurez-vous que vous possédez le Vario adéquate pour l'indication désirée.

	Vario 8 AC/DC	Vario 8 c/i* AC/DC	Vario 18 AC/DC	Vario 18 AC/DC	Vario 18 c/i* AC/DC
<b>Drainage général</b>	●	●	●	●	●
<b>Drainage thoracique</b>	●	●	●	●	●
<b>Drainage des plaies</b>	●	●	●	●	●
<b>Domaine ORL</b>	●	●	●	●	●
<b>Aspiration gastrique</b>	●	●	●	●	●

\*c = Aspiration constante / i = Aspiration intermittente

Champ d'application très vaste grâce à une large gamme d'accessoires adaptables au Vario. Contactez-nous, nous vous conseillerons volontiers!

## III Instructions de sécurité

Un fonctionnement correct et fiable n'est garanti qu'avec les accessoires Medela

Lire toutes les consignes de sécurité avant utilisation.

- Ne doit être utilisé que par du personnel médical expérimenté connaissant les techniques d'aspiration et l'utilisation des appareils d'aspiration. Destiné uniquement à l'aspiration médicale. Attention: Un usage inapproprié peut engendrer des douleurs ou blesser le patient.
- Avant de brancher l'appareil, veuillez contrôler que la tension électrique de l'appareil correspond à la tension électrique appliquée par votre établissement.
- L'appareil ne doit pas être utilisé et doit être réparé par le service après vente compétent, dans les cas suivants:
  - Lorsque le câble ou la prise électrique sont endommagés
  - Lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement
  - Lorsque l'appareil est endommagé
  - Lorsque l'appareil présente des défauts visibles en matières de sécurité
- Ne pas fixer le bocal 2L sur le coté.

- Le filtre de protection anti-débordement/bactéries protège l'appareil de tout reflux. Attention: l'aspiration est interrompue lorsque le filtre est humide/mouillé ou obstrué. (cf. chapitre X)

- Pendant son utilisation, l'aspirateur doit être en position verticale.
- L'appareil ne doit pas être utilisé pour l'aspiration de liquides explosifs, facilement inflammables ou corrosifs.
- Le tuyau de connexion livré avec l'appareil ne doit jamais entrer directement en contact avec la zone d'aspiration. Il faut toujours utiliser un cathéter d'aspiration stérile (danger d'infection).
- En cas de débordement, informer immédiatement le service technique interne et effectuer les manipulations indiquées dans le mode d'emploi.
- Préserver le câble d'alimentation de toute surface chaude.
- La prise électrique et le commutateur ON/OFF ne doivent pas entrer en contact avec l'humidité.
- La déconnexion de l'appareil du réseau est possible uniquement en débranchant la prise murale
- Ne jamais retirer la prise électrique en tirant sur le câble d'alimentation!
- Ne jamais faire fonctionner l'appareil dans des pièces à températures élevées, pendant le bain ou sous la douche, en cas de grande fatigue ou dans un environnement comportant des risques d'explosion.
- Ne jamais laisser fonctionner l'appareil sans surveillance
- Ne jamais placer l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
- Le Vario de Medela est un appareil médical qui exige des mesures de sécurité spécifiques en ce qui concerne la SEM. Il doit être installé et mis en fonction conformément aux informations annexées sur la SEM. Les appareils de communication à RF portables et mobiles peuvent influencer les appareils médicaux.

## Indications

**Drainage thoracique** Pour le drainage thoracique, nous recommandons d'utiliser le Vario 8 à vide faible avec les autres composants du système de drainage thoracique Medela (collecteur à usage unique). Sinon, Medela ne peut garantir un fonctionnement sûr du système.

**Drainage des plaies** Si le Vario doit être utilisé pour le drainage de plaies, il convient de s'assurer que la plaie ne se dessèche pas et que le pansement est imperméable. S'il s'accumule une quantité inhabituellement élevée de liquides dans le récipient collecteur (perte de sang importante), interrompre le drainage de la plaie.

**Aspiration gastrique** Avec le Vario 18c/i uniquement. En cas d'utilisation dans le domaine de l'aspiration gastrique, il est indispensable de vérifier au minimum 1 fois toutes les 4 heures l'état de santé du patient ainsi que le bon fonctionnement de l'appareil (sur les bases des signes acoustiques et optiques).

**Domaine ORL** Pour les patients chez lesquels un arrêt de l'aspirateur pourrait entraîner une situation critique, (p. ex. patients avec détresse respiratoire aiguë ou forte production de mucus), il est nécessaire de disposer d'un appareil supplémentaire.

Ce mode d'emploi doit être conservé pour les utilisations futures.

